



## Tasso Mini

TS採血キット取り扱い説明書

# tasso

採血をはじめましょう

# 1 準備

## Step 1



使用前に手を洗いましょう（医療従事者が採血する場合は手袋を着用してください）。

## Step 2



必要な物品をすべて準備し、トレイから本体を取り出します。※本体の色は写真と異なる場合があります。

## Step 3



付属の採血管のキャップをねじって外します。※キャップは後で使いますのでなくさないようにしてください。

## Step 4



採血管を本体にしっかりと差し込み、目盛りが外側を向くようにします。

## Step 5



ヒートパック中の金具を数回折り曲げて、温めます。※パックがない場合は、手で温めてください。

## Step 6



ヒートパックまたは手で採血部位を2分間こすり、血行を良くします。

## Step 7



アルコール綿等で採血部位を清浄にします。

## Step 8



本体のボタンに付けられている透明カバーを取り外します。

※もし、採血部位の体毛が濃い場合には、あらかじめ剃っていただくことで、確実に検体採取を行うことができます。

※もし、ヒートパックが熱すぎると感じる場合には、パックをハンカチやティッシュでくるんで使用してください。

## 2 採血

### Step 9



本体裏面の紙を剥がし、貼り付けます。腕は体の横にまっすぐ下げてください。

### Step 10



### Step 11



ボタンを一度だけしっかり押し離します。タイマーを5分にセットします。必要に応じて鏡を使って血液の溜まり具合を確認してください。そのままの状態で5分間経過するか、採血管の上のラインに到達したら外してください。  
※最初の1~2分間は血液が出てこないことがあります。

### Step 12



採血管を軽くねじりながら下に引いて本体から取り外します。

### Step 13



取り外した採血管にはキャップをしっかりとはめてください。

### Step 14



キャップをはめた状態の採血管を複数回、上下にひっくり返します。

### Step 15



付属の絆創膏を貼り、必要に応じて軽く圧迫します。

### 3 採血後

#### Step 16



すべての使用済み材料は、地域もしくは医療機関のルールに従って廃棄してください。

#### Step 17



血液サンプルを郵送等で検査機関に送付する場合は、提供された発送手順に従ってください。

## 製品説明

TS 採血キット(本体：Tasso Mini と呼ぶ)は、滅菌済み(本体)の使い捨て採血用医療機器です(単回使用自動ランセット(コード：37243002))。血液採取を行うために、本体の裏面粘着テープで機器を皮膚に固定します。その状態で本体のボタンを押すと、滅菌済みの刃が皮膚を軽く穿刺し、同時にわずかな吸引力が発生して、血液が付属の採血管に流れ込みます。あらかじめ設定された時間(約5分)が経過するか、採血管が一杯になると、採血は終了です。本体を皮膚からはがし、その後、採血管を取り外してキャップをし、必要に応じて輸送等の準備を行います。本体は一回限りの使用しかできません。使用后、刃は安全な位置に自動的に収納される設計となっており、安心してご使用いただけます。

TS 採血キット(認証番号：307AIBZX00027000)として提供される材料

- ・ TS ランセット
- ・ 採血管
- ・ 絆創膏
- ・ ヒートパック
- ・ 検体用ジッパー袋

必要な材料(提供されていない)

手袋(医療従事者用)

アルコール綿



問い合わせ先

株式会社新日本科学 Tasso

東京都中央区明石町 8-1 聖路加タワー

03-6260-6380 info@tasso-snbl.com

### 使用目的又は効果

血液検査のため、少量の血液を毛細血管から採取する。

### 廃棄方法

使用後は速やかに廃棄すること。

### 【警告】

1. 使用後の採血器具の本体には血液が付着している可能性があるため、使用後は速やかに廃棄すること。[感染の危険性がある。]
2. 感染の危険性があるため、採血部位の清浄は必ず行うこと。また、採血後は、絆創膏などで止血と保護を行うこと。傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けること。

### 【禁忌・禁止】

1. 出血性疾患や薬剤服用等により、止血機能が低下している患者、ショック・アレルギーの患者は使用しないこと。[採血により身体に異常をきたす可能性がある。]
2. 再使用禁止。使用後は必ず廃棄すること。[感染の危険性がある。]

## 【使用上の注意】＜重要な基本的注意＞

1. 包装開封後、速やかに使用すること。
2. 本キット使用時には、取扱説明書を必ず参照すること。
3. 穿刺は1回限りであり、感染予防のため、本体を再度皮膚に貼り付けないこと。
4. 採血は、皮膚に疾患、損傷のない部位で行うこと。
5. 採血は、本体及び採血管が床と垂直になる状態で行うこと。また、採血後、本体から採血管を取り外すまでは、本体へ血液が逆流する可能性があるため、本体及び採血管が床と垂直になる状態を保つこと。
6. 採血部位の血流（使用前の温めが不十分等）や本体の密着度合いによって、採血量が少なくなるもしくは全く得られない可能性がある。
7. 感染の危険性があるため、採血部位の清浄は必ず行うこと。
8. 本体の使用により、皮膚障害（化膿・発疹・発赤・かゆみなど）や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師に相談すること。
9. 本体の使用に際しては採血部位の皮膚を穿刺するため、傷口が残る可能性がある。傷口が気になる場合には、医師に相談すること。
10. 絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
11. 絆創膏は、傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
12. 絆創膏の使用により発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は医師に相談すること。
13. 低温やけどを起こす可能性があるため、ヒートパックの使用時には長時間継続的に使用しない。また、加温部に異常を感じた場合にはすぐに使用を中止すること。

はじめて、お使いですか？

使用動画は、下記サイトからご覧いただけます。

<https://vimeo.com/1116181616>

もしくは、こちらの QR コードをスキャン

